

オストメイトの方が、パウチやストーマ（人工肛門）の回りを洗うための設備です

サーモ水栓



右のハンドルを下に下げると、カランから水が出ます。上上げて、シャワーの開閉ボタンを押すとシャワーから水が出ます。左のハンドルを回して、ご希望の温度に合わせます。

シャワー



ストーマ（人工肛門）の回りを洗うときに使用します。ボタンを押している間は水が出て、離すと止まります。
●ご使用前に、10秒程度湯を流して、水栓内部をリフレッシュしてください。
●ご使用の際は、水栓の右のハンドルを上げ、必ずシャワーを持った状態で開閉ボタンの操作を行ってください。
●使用後は必ず、水栓の右のハンドルを閉め、フックにかけてください。

シングルフック



ビニール袋などを掛けておくことができます。

汚物流し



汚物を流したり、パウチを洗うための汚物流しです。
●汚物流しには、汚物と備え付けのトイレトペーパー以外流さないでください。詰まって流れなくなるおそれがあります。

タッチスイッチ



汚物流しを洗浄するスイッチです。ボタンを押すと流れます。

紙巻器



参考資料 パウチしびん洗浄水栓使用型

